

Technisches Datenblatt

meco® Alginate

Steriler Alginateverband.



Anwendungsbereiche

- mäßig bis stark nässende Wunden
- tiefe Wunden, Wundtaschen, unterminierte Wunden
- infizierte und nicht infizierte chronische Wunden
- blutende Wunden
- Verbrennungen zweiten Grades


Produkteigenschaften

- meco® Alginate bildet bei Exsudataufnahme ein hydrophiles Gel, welches das feuchte Wundmilieu aufrechterhält.
- meco® Alginate schließt abgestorbene Zellen ein.
- Der Alginateverband schmiegt sich an das Wundbett an und sorgt für ein gutes Wundheilungsklima.
- meco® Alginate kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

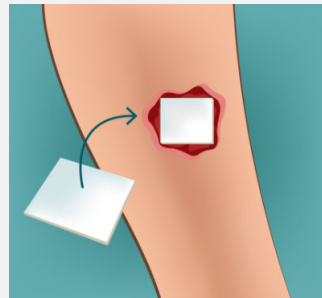

2. meco® Alginate auf Wundgröße anpassen und locker in die Wunde eintamponieren.



3. meco® Alginate mit einem Sekundärverband abdecken. Maximale Verweildauer auf der Wunde: 7 Tage.



Hinweise:

- meco® Alginate kann nicht im Zusammenhang mit Vakuumversiegelungstherapie (VVS) angewendet werden.
- Eine Überlappung von meco® Alginate über den Wundrand muss vermieden werden (Mazerationsrisiko).

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundaufgabe	PZN	Inhalt
4116	2 x 30 cm (Tamponade)	18338248	5 Stück
4117	5 x 5 cm	18338219	10 Stück
4118	10 x 10 cm	18338231	10 Stück