


Technisches Datenblatt

# mecco® Compression Duo

Zwei Kurzzugbinden.

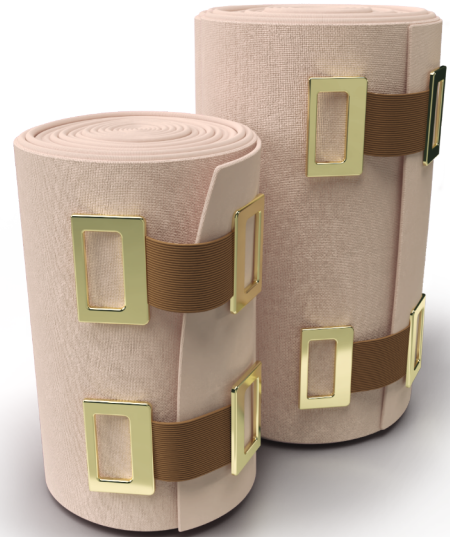


## Anwendungsbereiche

- für die klassische gegenläufige Verbandtechnik
- zur kräftigen Kompression bei akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis
- zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw.
- zum Stützen und Entlasten von Gelenken

## Produkteigenschaften

- Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck.
- Die Kompressionsbinden sind beige und bestehen vollständig aus Baumwolle.
- mecco® Compression Duo ist 80% dehnbar und textilelastisch.
- Die Kurzzugbinden sind hautfreundlich, sowie atmungsaktiv.


## Anwendung

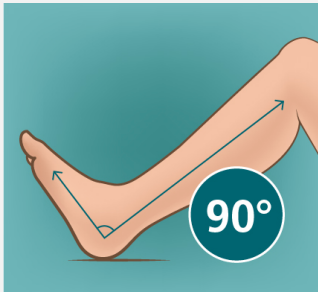

**1.** Im Liegen den Fuß im 90° Winkel anstellen und ab dem Zehengrundgelenk bis 2cm unterhalb der Kniekehle mit einer Polsterwatte (z.B. mecco® Soft) umwickeln.



**2.** Die 8cm Kurzzugbinde oberhalb der Zehen am Fußspann mit adäquatem Druck anlegen. Nach zwei Umdrehungen über die Fußaußenseite, die Ferse in Achtertouren miteinschließen. Oberhalb des Knöchels spiralförmig mit adäquatem Druck um das Bein, bis 2cm unterhalb der Kniekehle wickeln und das Bindende fixieren.

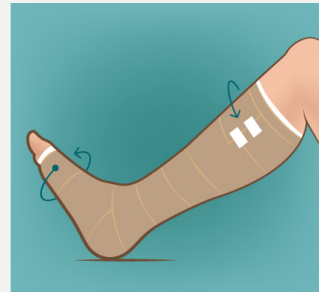

**3.** Die zweite Kurzzugbinde (10cm) nun im gleichen Schema, aber in entgegengesetzter Richtung am Fußspann anlegen und nach zwei Umdrehungen die Ferse in Achtertouren einschließen. Nun von unten nach oben wickeln, sodass keine freie Stelle mehr sichtbar ist. Anschließend das Bindende fixieren.



### Hinweise:

- Das Entstehen von Falten beim Anlegen der Binden sollte vermieden werden.
- Achten Sie nach dem Anlegen auf eine gute Durchblutung der Zehen, um sicherzustellen, dass der Druck des Verbandes nicht zu hoch ist.
- Gegebenenfalls muss die Anlegetechnik entsprechend der ärztlichen Verordnung angepasst werden.

## Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe	PZN	Inhalt
0921-1	5m* x 8/10cm	18704351	1 x Kurzzugbinde 5m* x 8cm + 1 x Kurzzugbinde 5m* x 10cm

\* in gedehntem Zustand