

## Technisches Datenblatt

# meco® Fiber

Sterile Hydrofaser aus Carboxymethylcellulose.



## Anwendungsbereiche

- bei nässenden akuten und chronischen Wunden
- bei Wundhöhlen und Unterminierungen
- bei Verbrennungen zweiten Grades
- bei Schürfwunden
- bei palliativen Wunden mit Exsudatbildung


## Produkteigenschaften

- meco® Fiber nimmt Wundexsudat vertikal auf, hält das Wundmilieu feucht und schützt Wunde, Wundrand und Wundumgebung.
- meco® Fiber bildet bei Exsudataufnahme ein formstabiles Gel.
- meco® Fiber schließt abgestorbene Zellen ein.
- meco® Fiber kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

## Anwendung



**1.** Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

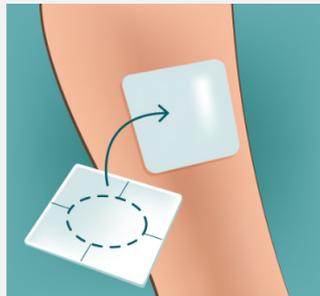

**2.** meco® Fiber mindestens 2 cm den Wundrand überlappend platzieren.



**3.** meco® Fiber mit einem Sekundärverband abdecken. Maximale Verweildauer auf der Wunde: 7 Tage.



### Hinweise:

- Eventuelle Faserrückstände sollten aus der Wunde entfernt werden
- meco® Fiber kann nicht im Zusammenhang mit Vakuumversiegelungstherapie (VVS) angewendet werden.

## Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundaufgabe	PZN	Inhalt
1120	2 x 30 (Tamponade)	18445748	5 Stück
1116	5 x 5 cm	16820403	10 Stück
1117	10 x 10 cm	16820426	10 Stück
1118	15 x 15 cm	16820455	5 Stück
1119	20 x 30 cm	18445731	5 Stück