

Technisches Datenblatt

# meco<sup>®</sup> Fix Transparent

Transparente Polyurethanfolie.




## Anwendungsbereiche

- zur einfachen und effektiven Fixierung von Verbänden und Kathetern
- ideal für Gelenke und andere häufig bewegte Körperstellen


## Produkteigenschaften

- meco<sup>®</sup> Fix Transparent haftet vollflächig und sanft auf der Haut.
- meco<sup>®</sup> Fix Transparent ist längs und quer dehnbar und damit sehr flexibel.
- Die transparente Polyurethanfolie wirkt gleichzeitig wasserabweisend und schützt den darunterliegenden Verband somit vor Feuchtigkeit.


## Anwendung

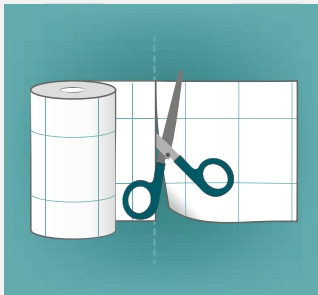

**1.** Einen Streifen von meco<sup>®</sup> Fix Transparent in der gewünschten Größe abschneiden.

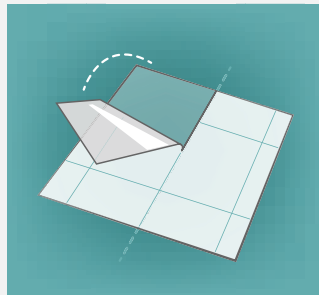

**2.** Eine Hälfte des Rasterpapiers vollständig von der Folie lösen.

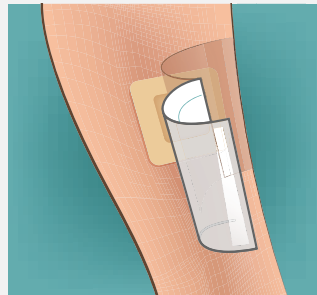

**3.** Die Folie mit der klebenden Seite an der gewünschten Stelle platzieren, das restliche Rasterpapier abziehen und damit den Verband fixieren.  
Anschließend die obere Schutzfolie entfernen.



### Hinweise:

- meco<sup>®</sup> Fix Transparent nur leicht an der Haut andrücken.
- Sämtliche Spannung beim Anlegen der Folie, sowie das Entstehen von Falten sollte vermieden werden.

## Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe	PZN	Inhalt
8126	10m x 5cm	18388424	1 Rolle
8127	10m x 10cm	18388430	1 Rolle
8128	10m x 15cm	18388447	1 Rolle