

Technisches Datenblatt

meco[®] Foam Adhesive

Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikon-Beschichtung.



Anwendungsbereiche

- bei Operationswunden
- bei Ulcus cruris
- beim Diabetischen Fußsyndrom
- bei Dekubitalgeschwüren
- bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades


Produkteigenschaften

- Der Schaumverband absorbiert und speichert Wundexsudat effektiv und sicher.
- Die durchlässige Struktur beschleunigt und verbessert das Absorptionsvermögen.
- Durch die weiche Silikonschicht ist ein atraumatischer Verbandwechsel gewährleistet.
- meco[®] Foam Adhesive kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

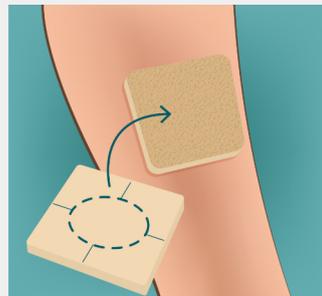

2. meco[®] Foam Adhesive mindestens 2 cm den Wundrand überlappend, mit der weichen Seite auf der Wunde platzieren.



3. meco[®] Foam Adhesive mit einem Sekundärverband fixieren. Maximale Verweildauer auf der Wunde: 7 Tage.



Hinweise:

- Mit Sekundärverbänden kombinierbar.
- Reicht das Wundsekret bis auf 2 cm an den Rand von meco[®] Foam Adhesive heran, ist ein Verbandwechsel erforderlich.
- Nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen verwenden.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundauflage	PZN	Inhalt
3129	7,5 x 7,5 cm	17843955	10 Stück
3126	10 x 20 cm	17843978	10 Stück
3127	12,5 x 12,5 cm	17843961	10 Stück
3128	20 x 30 cm	17843984	5 Stück