


Technisches Datenblatt

meco® Foam Adhesive Border Lite

Silikon-beschichteter Wundverband aus Polyurethanschaum mit Kleberand.

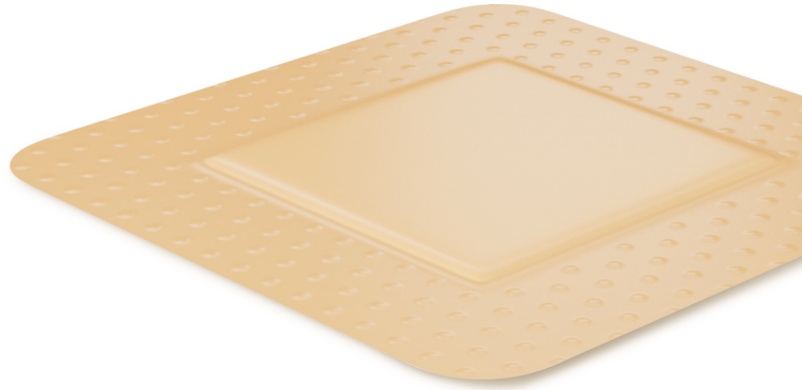

Anwendungsbereiche

- bei schwach exsudierenden Wunden
- bei Operationswunden
- bei Ulcus cruris
- beim Diabetischen Fußsyndrom
- bei Dekubitalgeschwüren
- bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades


Produkteigenschaften

- Der Schaumverband absorbiert und speichert Wundexsudat effektiv und sicher.
- Die durchlässige Struktur beschleunigt und verbessert das Absorptionsvermögen.
- Durch die weiche Silikonschicht ist ein atraumatischer Verbandwechsel gewährleistet.
- Der zusätzliche Kleberand gewährleistet eine besonders gute Haftung an der Haut.
- meco® Foam Adhesive Border Lite kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

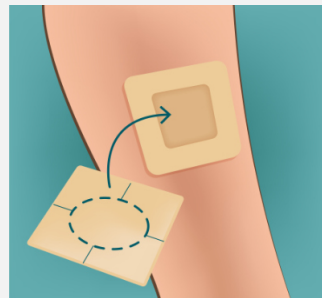

2. Das Wundkissen des meco® Foam Adhesive Border Lite mindestens 2 cm den Wundrand überrappend platzieren.



3. meco® Foam Adhesive Border Lite zum Beispiel mit einer Binde fixieren. Maximale Verweildauer: 7 Tage.



Hinweise:

- Reicht das Wundsekret bis auf 2 cm an den Rand von meco® Foam Adhesive Border Lite heran, ist ein Verbandwechsel erforderlich.
- Nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen verwenden.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundauflege	Größe Wundkissen	PZN	Inhalt
3166	4 x 5 cm	2 x 3 cm	18350864	5 Stück
3167	8 x 15 cm	4 x 10 cm	18350870	5 Stück
3168	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	18350887	5 Stück
3169	15 x 15 cm	11 x 11 cm	18350893	5 Stück