

Technisches Datenblatt

meco[®] Foam Adhesive Border

Silikon-beschichteter Wundverband aus Polyurethanschaum mit Kleberand.



Anwendungsbereiche

- bei Operationswunden
- bei Ulcus cruris
- beim Diabetischen Fußsyndrom
- bei Dekubitalgeschwüren
- bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades


Produkteigenschaften

- Der Schaumverband absorbiert und speichert Wundexsudat effektiv und sicher.
- Die durchlässige Struktur beschleunigt und verbessert das Absorptionsvermögen.
- Durch die weiche Silikonschicht ist ein atraumatischer Verbandwechsel gewährleistet.
- Der zusätzliche Kleberand gewährleistet eine besonders gute Haftung an der Haut.
- meco[®] Foam Adhesive Border kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

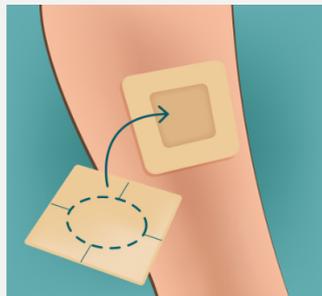

2. Das Wundkissen des meco[®] Foam Adhesive Borders mindestens 2 cm den Wundrand überrappend platzieren.



3. meco[®] Foam Adhesive Border zum Beispiel mit einer Binde fixieren. Maximale Verweildauer: 7 Tage.



Hinweise:

- Reicht das Wundsekret bis auf 2 cm an den Rand von meco[®] Foam Adhesive Border heran, ist ein Verbandwechsel erforderlich.
- Nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen verwenden.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundaufgabe	Größe Wundkissen	PZN	Inhalt
3136	7,5 x 7,5 cm	5,5 x 5,5 cm	18106348	10 Stück
0332-10	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	17835447	10 Stück
0333-10	10 x 20 cm	6 x 16 cm	18782836	10 Stück
3137	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	17835453	10 Stück
3139	14 x 17 cm (Oval)	10 x 13 cm	18117582	5 Stück
3146	19 x 19 cm (Sacrum)	13 x 14 cm	18224875	10 Stück