

Technisches Datenblatt

meco® Foam Non-Adhesive

Wundverband aus Polyurethanschaum.



Anwendungsbereiche

- bei Operationswunden
- bei Ulcus cruris
- beim Diabetischen Fußsyndrom
- bei Dekubitalgeschwüren
- bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades


Produkteigenschaften

- Der Schaumverband absorbiert und speichert Wundexsudat effektiv und sicher.
- Die durchlässige Struktur beschleunigt und verbessert das Absorptionsvermögen.
- meco® Foam Non-Adhesive kann unter Kompressions-therapie angewendet werden.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

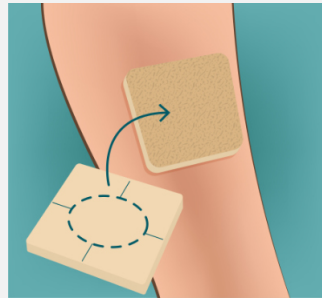

2. meco® Foam Non-Adhesive mindestens 2 cm den Wundrand überlappend, mit der weichen Seite auf der Wunde platzieren.



3. meco® Foam Non-Adhesive mit einem Sekundärverband fixieren. Maximale Verweildauer auf der Wunde: 7 Tage.



Hinweise:

- Mit Sekundärverbänden kombinierbar.
- Reicht das Wundsekret bis auf 2 cm an den Rand von meco® Foam Non-Adhesive heran, ist ein Verbandwechsel erforderlich.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundauflage	PZN	Inhalt
3116	10 x 10 cm	17836062	10 Stück
3117	10 x 20 cm	17836085	10 Stück
3118	15 x 15 cm	17836079	10 Stück
3119	20 x 20 cm	18338076	10 Stück
3156	14 x 23 cm (Heel)	18224869	5 Stück