

Technisches Datenblatt

meco® Leg

Gebrauchsfertiger Unterschenkelverband.




Anwendungsbereiche

- zum Schutz der Haut am Unterschenkel
- zur Unterstützung einer medizinischen Behandlung (alleine oder in Verbindung mit anderen Produkten)

Produkteigenschaften

- meco® Leg kann auf intakter, unverletzter Haut als Primärverband angewendet werden.
- Auf verletzter Haut unterstützt meco® Leg als Sekundär- oder Tertiärverband.
- meco® Leg bewahrt darunterliegende Schichten und nimmt überschüssiges Exsudat auf.


Anwendung

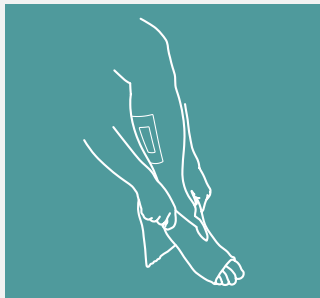

1. Verschlüsse öffnen und meco® Leg über die Zehen bis zum Knöchel ziehen.



2. Die Verschlüsse der Reihen nach von unten nach oben verschließen.

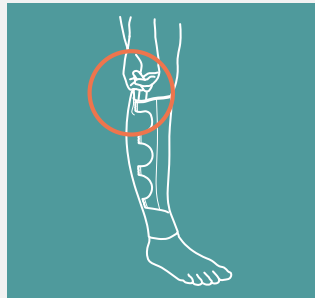

3. meco® Leg auf den korrekten Sitz überprüfen und ggf. nachjustieren.



Hinweise:

- meco® Leg darf nicht direkt auf verletzter Haut oder offenen Wunden ohne darunterliegende Primärlage (z.B. Pflaster) angewendet werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe	Wadenumfang	Wadenlänge	PZN	Inhalt
7126	M	28 – 42 cm	39 – 48 cm	18208126	10 Stück
7127	L	39 – 53 cm	39 – 48 cm	18208132	10 Stück