

Technisches Datenblatt

mecco® Silicone Grid

Wunddistanzgitter mit Silikon.



Anwendungsbereiche

- bei Hautrissen, Hautabschürfungen, Blasen und Schnittwunden
- bei Operationswunden
- bei teildicken Verbrennungen
- bei Bein- und Fußgeschwüren


Produkteigenschaften

- Das Silikonnetz passt sich der Form der Wunde an.
- Die offene perforierte Struktur lässt Exsudat vertikal in den absorbierenden Sekundärverband eindringen.
- Das aus Silikon bestehende Wunddistanzgitter gewährleistet einen atraumatischen Verbandwechsel.


Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

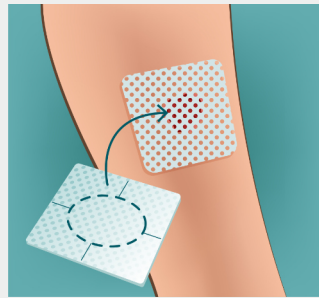

2. mecco® Silicone Grid mindestens 2 cm den Wundrand überlappend platzieren.

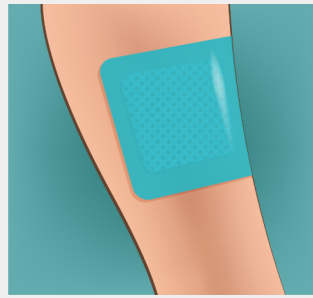

3. mecco® Silicone Grid mit einem Sekundärverband abdecken und fixieren.



Hinweise:

- mecco® Silicone Grid kann zugeschnitten werden.
- Es sollte vermieden werden, das Netz während der Anwendung zu dehnen.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundaufgabe	PZN	Inhalt
5119	5 x 7,5 cm	17616403	10 Stück
5116	10 x 12 cm	17616426	10 Stück
5117	10 x 20 cm	17616432	10 Stück
5118	20 x 30 cm	17616449	5 Stück