

Technisches Datenblatt

meco® Sorb Sterile

Sterile Saugkomresse.



Anwendungsbereiche

- bei mäßig bis stark nässenden Wunden
- zur Erstversorgung von akuten Wunden


Produkteigenschaften

- Der Saugkern von meco® Sorb Sterile besteht aus Zellstofflocken und erzielt so eine hohe Saugkraft.
- meco® Sorb Sterile ist besonders weich und dient so zusätzlich als Polster.
- Die blaue Rückseite ist luftdurchlässig und flüssigkeitsabweisend und schützt so die Textilien vor Verunreinigung.

Anwendung



1. Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

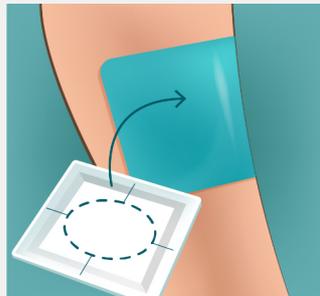

2. Den Saugkern von meco® Sorb Sterile mindestens 2 cm den Wundrand überlappend platzieren.



3. meco® Sorb Sterile als Primär- oder Sekundärverband fixieren.



Hinweise:

- meco® Sorb Sterile darf nicht eingeschnitten werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundauflege	Größe Wundkissen	PZN	Inhalt
0621-50	10 x 10 cm	8,5 x 10 cm	18668158	50 Stück
0622-25	10 x 20 cm	10 x 16 cm	18668164	25 Stück
0623-12	20 x 20 cm	18 x 20 cm	18668170	12 Stück
0624-10	20 x 40 cm	20 x 36,5 cm	18668187	10 Stück