


Technisches Datenblatt

# meco<sup>®</sup> Superabsorber

Sterile, superabsorbierende Wundauflage.

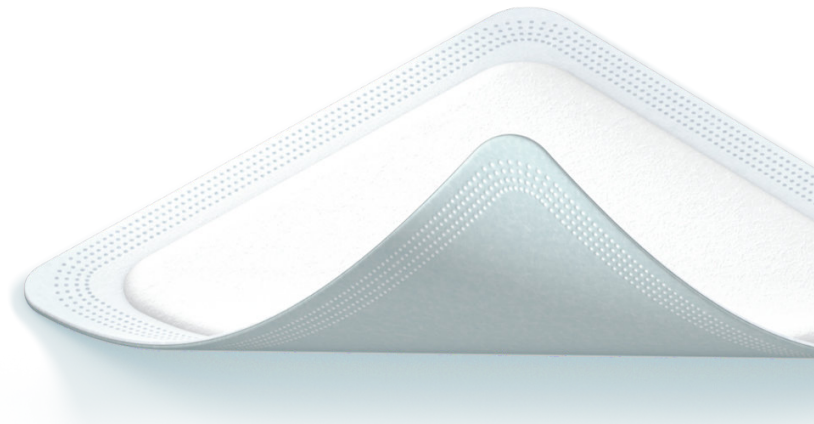

## Anwendungsbereiche

- bei mäßig bis stark nässenden Wunden
- bei akuten und chronischen Wunden
- zur Vermeidung von Mazerationen und Schädigungen der wundumgebenden Haut


## Produkteigenschaften

- meco<sup>®</sup> Superabsorber absorbiert und bindet hohe Exsudatmengen.
- meco<sup>®</sup> Superabsorber minimiert das Mazerationsrisiko und erhöht die Verbandliegedauer.
- meco<sup>®</sup> Superabsorber kann unter Kompressionstherapie angewendet werden.

## Anwendung



**1.** Wunde reinigen und umgebende Haut trocknen.

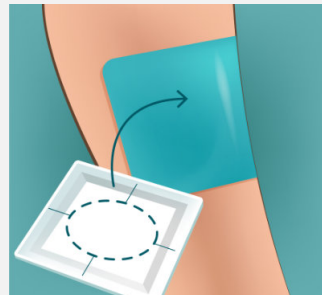

**2.** Den Saugkern des meco<sup>®</sup> Superabsorbers mindestens 2 cm den Wundrand überlappend platzieren.



**3.** meco<sup>®</sup> Superabsorber als Primär- oder Sekundärverband fixieren. Maximale Verweildauer auf der Wunde: 7 Tage.



### Hinweise:

- meco<sup>®</sup> Superabsorber sollte eng auf dem Wundbett oder dem Primärverband aufliegen.
- Durch Befeuchten der Wundauflage mit einer Kochsalzlösung kann die Auflage leichter entfernt werden.

## Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Größe Wundauflage	Größe Wundkissen	PZN	Inhalt
0116	10 x 10 cm	7 x 7 cm	16820461	10 Stück
0121	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	17969159	10 Stück
0122	12,5 x 22,5 cm	8,5 x 18,5 cm	17969142	10 Stück
0118	20 x 20 cm	16,5 x 16,5 cm	16820484	10 Stück
0119	20 x 30 cm	16,5 x 26,5 cm	16820490	10 Stück
0123	25 x 40 cm	21,5 x 36,5 cm	18338082	10 Stück